

ΚΩΔ.: ΜΠΑΚΡΑΙΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BACKRIGHT SEAT CUSHION

Το Backright Seat Cushion βοηθάει ώστε να κάθεστε άνετα και στην σωστή στάση. Μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του πόνου της πλάτης καθώς επίσης και στην μείωση του πόνου από ισχιαλγία.

Επίσης είναι ιδανικό για όσους πάσχουν από αιμορροΐδες.

Το εργονομικό του σχέδιο παρέχει υποστήριξη και άνεση ενώ μειώνει την πίεση στο οστό της ουράς.

Το memory foam διατηρεί το σχήμα του ενώ αναπνέει και διατηρεί το μαξιλάρι δροσερό.

Είναι ιδανικό για το κάθισμα του γραφείου, για την οδήγηση και για τα ταξίδια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Επειδή το προϊόν είναι καινούργιο και αχρησιμοποίητο μπορεί να έχει μυρωδιά καινούργιου. Η μυρωδιά μπορεί να μειωθεί βγάζοντας το μαξιλάρι από την σακούλα και αφήνοντάς το να αεριστεί για μερικές ημέρες.

Εάν θέλετε να εξαφανίσετε γρήγορα την μυρωδιά προτείνουμε να πλύνετε το κάλυμμα. Ακολουθείστε τις οδηγίες πλυσίματος που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το memory foam αντιδρά στη ζέστη. Μπορεί να σας φανεί σκληρό στην αρχή αλλά γίνεται πιο μαλακό στην συνέχεια καθώς απορροφά τη ζέστη του σώματος.

- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή το μαξιλάρι με αιχμηρά αντικείμενα για να μην σκιστεί το ύφασμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Η αντιολισθητική πλευρά του μαξιλαριού μπορεί να αφήσει χρώμα σε ανοιχτόχρωμα δερμάτινα καθίσματα ή καθίσματα από βινύλιο. Πλύνετε το κάλυμμα με κρύο νερό και σαπούνι πριν από τη χρήση. Όταν το κάλυμμα είναι στεγνό ελέγξτε την ανθεκτικότητα του χρώματος με μία πετσέτα και ζεστό νερό.



ΧΡΗΣΗ

Τοποθετήστε το μαξιλάρι στην μέση του καθίσματος ή της καρέκλας όπως φαίνεται στην εικ. 1.

Τοποθετήστε το μαξιλάρι σε επίπεδη επιφάνεια με την εσοχή σε σχήμα πέταλο να βρίσκεται στην πλάτη του καθίσματος όπως φαίνεται στην εικ. 1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Ανοίξτε το φερμουάρ στο πίσω μέρος του μαξιλαριού (εικ. 2).
2. Βάλτε το χέρι σας εντός του καλύμματος και τραβήξτε την μία πλευρά του μαξιλαριού (εικ. 3).
3. Σιγά σιγά τραβήξτε το κάλυμμα, εάν βρίσκετε δύσκολο να αφαιρέσετε το μαξιλάρι, διπλώστε το μαξιλάρι για να τραβήξετε το κάλυμμα με μεγαλύτερη ευκολία (εικ. 4).
4. Πλύσιμο του καλύμματος στο πλυντήριο με κρύο νερό. ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ή ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ (εικ. 5).

Σύνθεση μαξιλαριού: 100% memory foam

Σύνθεση καλύμματος: 100% πολυέστερ