

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ TWIN GRIP CANE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Fig. A

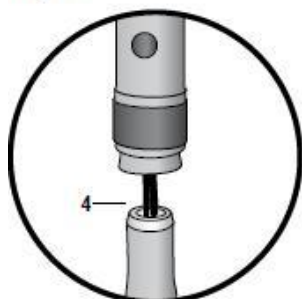


Fig. B



Fig. C



Fig. D

Περιγραφή προϊόντος

1. Χειρολαβή
2. Τμήματα μπαστουιού
3. Ιμάντας καρπού
4. Ελαστικό κορδόνι
5. Κουμπί ρύθμισης μήκους
6. Φως
7. Διακόπτης φωτός
8. Διαμέρισμα μπαταριών
9. Κατώτερη χειρολαβή

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Grip Cane για πρώτη φορά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παγωμένες ή ολισθηρές επιφάνειες.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 115 κιλών.

Μην αποσυναρμολογείτε το σώμα του μπαστουιού, το οποίο περιέχει το ελαστικό κορδόνι.

Το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση.

Μην κοιτάτε απευθείας στο φως του φακού.

Δεν είναι κατάλληλο για σκι.

Περιοχές χρήσης: άσφαλτος και μονοπάτια δάσους. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μπαστούνι σε βρεγμένες, ολισθηρές επιφάνειες.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση ως μπαστούνι πεζοπορίας. Μην το χρησιμοποιείτε ως μπαστούνι για σκι.

Μην χρησιμοποιείτε το μπαστούνι αν είναι ελαττωματικό.

Οδηγίες χρήσης

Ανάπτυξη του Twin Grip Cane

Το Twin Grip Cane έχει έναν ιμάντα καρπού που συγκρατεί μαζί τα τμήματα του μπαστουιού όταν αυτό είναι διπλωμένο. Για να ξεδιπλώσετε το μπαστούνι, πρώτα απασφαλίστε τον ιμάντα καρπού (3). Πιάστε τη χειρολαβή (1), κρατήστε την ψηλά και αφήστε τα τμήματα του μπαστουιού (2) να ξεδιπλωθούν με τη δύναμη της βαρύτητας.

Το Twin Grip Cane διαθέτει, επίσης, μία κατώτερη χειρολαβή (9). Για να περπατήσετε πιο άνετα με το μπαστούνι, σπρώξτε την περιστρεφόμενη κατώτερη χειρολαβή (9) ώστε να μην είναι στη μέση.

Σημαντικό: Προς αποφυγή πτώσεων, πάντα να βεβαιώνετε ότι όλα τα τμήματα του μπαστουιού (2) είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα και ασφαλισμένα στη θέση τους (βλ. Εικόνα Β). Πριν χρησιμοποιήσετε το μπαστούνι για να στηριχτείτε, βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα και το μπαστούνι είναι άκαμπτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του ελαστικού κορδονιού (4) μέσα στο μπαστούνι, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε μη προστατευμένα μέρη του σώματος, ειδικά στα μάτια.

Αν το ελαστικό κορδόνι (4) σπάσει, πάθει ζημιά ή φθαρεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην τεντώνετε το ελαστικό κορδόνι (4) περισσότερο από όσο χρειάζεται για ξεδιπλώσετε ή να διπλώσετε το μπαστούνι (2).



Ρύθμιση του ύψους του Twin Grip Cane

Το Twin Grip Cane διαθέτει πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις ύψους. Για να το κάνετε μακρύτερο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης ύψους (5), όπως φαίνεται στην Εικόνα C, τραβήξτε τη χειρολαβή και ελευθερώστε το κουμπί ρύθμισης ύψους για να κλειδώσει σε χαμηλότερη υποδοχή. Για να κοντύνετε το μπαστούνι, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης ύψους (5), πιέστε τη χειρολαβή και ελευθερώστε το κουμπί ρύθμισης ύψους για να κλειδώσει σε ψηλότερη υποδοχή. Προσαρμόστε το ύψος του μπαστουιού σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προς αποφυγή πτώσεων, πάντα να βεβαιώνετε ότι όλα τα τμήματα του μπαστουιού (2) είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα και ασφαλισμένα στη θέση τους.

Χρήση του φωτός του Twin Grip Cane

Ένα προσαρμοζόμενο φως (6) βρίσκεται στην άκρη της χειρολαβής (1). Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως, πατήστε το διακόπτη φωτός (7) στη χειρολαβή του μπαστουιού (1).

Το φως κινείται πάνω και κάτω, ώστε να το κατευθύνετε στο σημείο που θέλετε.

Καθαρισμός

Καθαρίστε το προϊόν με ένα νωπό πανί.

Διπλώνοντας το Twin Grip Cane

Για να αποθηκεύσετε το μπαστούνι, ξεχωρίστε τα τμήματα, όπως φαίνεται στην Εικόνα D και πιάστε τα μαζί. Μόλις έχετε ξεχωρίσει και πιάσει όλα τα τμήματα, ασφαλίστε τα με τον ιμάντα καρπού (3). Ασφαλίστε τα τμήματα με τους συνδετήρες στην άκρη του ιμάντα.

Εισαγωγή και Αλλαγή μπαταριών

Το Twin Grip Cane λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες LR44 (δεν περιλαμβάνονται). Για να εισάγετε τις μπαταρίες, ξεβιδώστε το φως (6), αφαιρέστε το διαμέρισμα μπαταριών (8) τραβώντας την ετικέτα και εισάγετε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε το διαμέρισμα μπαταριών στην ίδια θέση στην οποία βρισκόταν όταν το αφαιρέσατε και βιδώστε το φως στη θέση του (6). Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι ασφαλές στη θέση του και λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί, επαναλάβετε τη διαδικασία και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα μέρη σωστά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250