

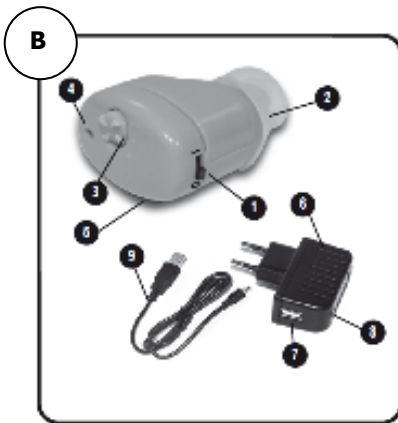


Κωδ: ΑΚΙΟΥΤ


**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ACUTRUE 2 ΤΕΜ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

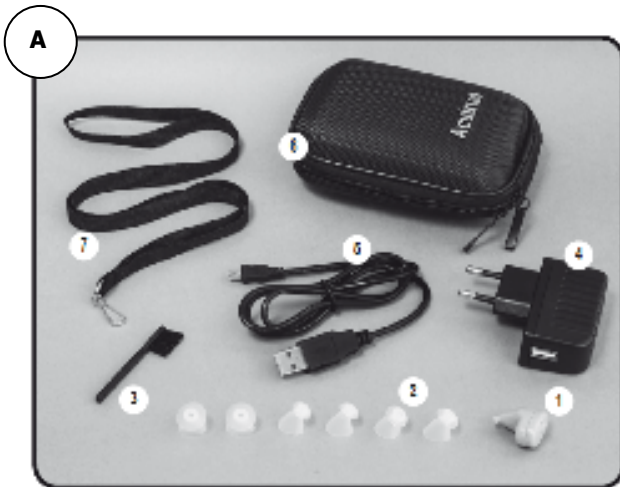

Οδηγίες χρήσης

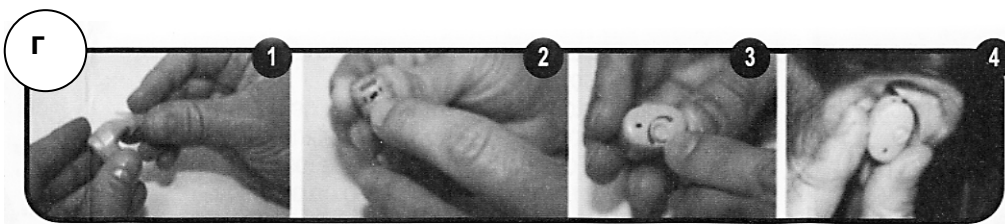

Επαναφορτίζοντας την συσκευή

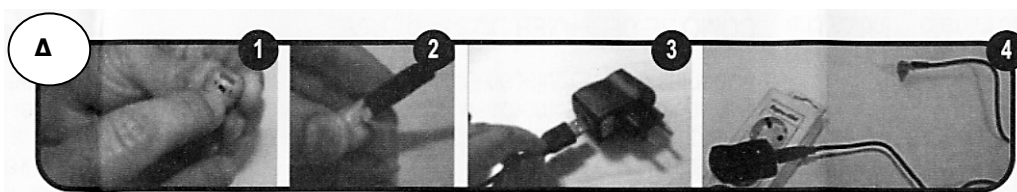

Εικόνα Α:**Το σετ περιλαμβάνει:**

1. Ενισχυτής ήχου 2 τεμ.
2. Άκρα από σιλικόνη: 2 μικρά, 2 μεσαία, 2 μεγάλα
3. Βουρτσάκι
4. Αντάπτορας
5. Καλώδιο φόρτισης
6. Θήκη
7. Λουρί

Εικόνα Β**Περιγραφή προϊόντος:**

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Αντικαταστάσιμο άκρο σιλικόνης
3. Ρυθμιστής ήχου
4. Μικρόφωνο
5. Υποδοχή για το καλώδιο φόρτισης
6. Αντάπτορας
7. Υποδοχή για το καλώδιο φόρτισης
8. Ενδεικτικό φωτάκι φόρτισης
9. Καλώδιο φόρτισης

Τεχνικές προδιαγραφές:

Κωδικός μοντέλου : VVAVACIND0245

Κωδικός μοντέλου set : VVAVACSET0036

Τάση: 1.2 V

Χρόνος φόρτισης: 8 συνεχόμενες ώρες

Ρεύμα λειτουργίας: Μέγιστο- 2.5 mA, Ελάχιστο- 1 mA

Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 200 ohm


Μέγιστη ακουστική έξοδος: 130 dB

Συνολική αλλοίωση αρμονίας: 3.0 % (AT 500 Hz 70dB SPL)

Απόκριση συχνότητας του ενισχυτή: 209- 3500 Hz


Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Κρατήστε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το AcuTrue στο αυτί σας. Τοποθετήστε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς του αυτιού.
- Όταν τοποθετείτε το AcuTrue στο αυτί σας, μην το σπρώξετε έντονα προς τα μέσα. Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να ακούσετε έναν διαπεραστικό ήχο.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πάντα να ξεκινάτε από χαμηλή ένταση ήχου και σταδιακά να την αυξάνετε για να αποφύγετε απότομους, δυνατούς ήχους που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ακοής. (εικ.1)

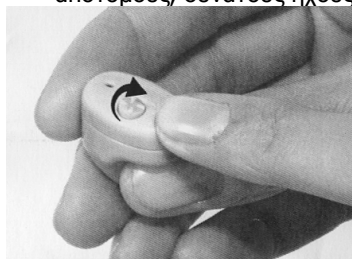

εικ.1

- Αν οι ήχοι είναι πολύ δυνατοί, αφαιρέστε την συσκευή από το αυτί σας, χαμηλώστε τον ήχο και ξανατοποθετήστε την στο αυτί σας.
- Τοποθετείτε το AcuTrue στο αυτί σας, πάντα με το μικρόφωνο προς τα έξω. (εικ.2)

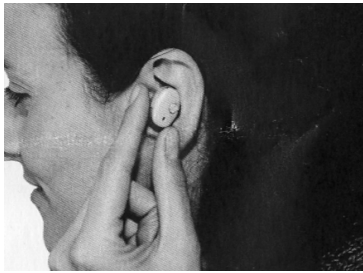

εικ.2

- Το AcuTtrue δεν είναι ιατρική συσκευή ούτε ακουστικό βαρηκοΐας,
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το μακριά από νερά για να αποφύγετε τυχόν φθορές,
- Μην υποβάλλετε την συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών Κελσίου και άνω των 45 βαθμών Κελσίου.
- Καθαρίζετε την συσκευή με ένα στεγνό πανί.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε το AcuTtrue για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το καλά πριν το επαναχρησιμοποιήσετε.

Εικόνα Γ Οδηγίες χρήσης

1. Τοποθετήστε το άκρο από σιλικόνη που εφαρμόζει καλύτερα στο αυτί σας. (εικόνα Γ1)
2. Τοποθετήστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «I» για να ενεργοποιήσετε το AcuTtrue. (εικόνα Γ2)
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο σημείο που εσείς επιθυμείτε. (εικόνα Γ3).
4. Τοποθετήστε το AcuTtrue στο αυτί σας στη θέση που ορίζεται στην εικόνα Γ4.
5. Συντήρηση.
 - Κρατήστε το AcuTtrue σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο με ποσοστό υγρασίας περίπου 80%.
 - Καθαρίστε το AcuTtrue με ένα βουρτσάκι κι ένα στεγνό πανί.
 - Πλύντε τις άκρες σιλικόνης με νερό και σαπούνι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι εντελώς στεγνές πριν τις επανατοποθετήσετε στην συσκευή.

Εικόνα Δ Επαναφορτίζοντας την συσκευή

- Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται μόνο με το καλώδιο που διαθέτει το σετ. Δεν συνιστάται να την φορτίζετε με άλλο φορτιστή ή να την συνδέετε απευθείας στον υπολογιστή.
- Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 15 mA κι όταν είναι πλήρως φορτισμένη η συσκευή, λειτουργεί για 10 συνεχόμενες ώρες.
- Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης είναι 8 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι 230V.
- Διαδικασία:
 - ο Θέστε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση «O». (βλ. Εικ. Δ1)
 - ο Ανασηκώστε το μικρό παραθυράκι της συσκευής και συνδέστε το καλώδιο. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στον αντάπτορα. (εικόνα Δ2 και Δ3)
 - ο Συνδέστε τον αντάπτορα με μία πρίζα. (Δ4)

Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση της συσκευής

- Με μία απαλή, ανορθωμένη βούρτσα, βουρτσίστε πάνω κάτω στο ακουστικό για να αφαιρέσετε το κέρι που μπορεί να έχει μαζευτεί πάνω του. Αυτό προλαμβάνει τον σχηματισμό κεριού πάνω του.
- Βεβαιωθείτε ότι η οπή του ακουστικού έχει καθαριστεί καλά.
- Σκουπίστε την θήκη μόνο με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή άλλα χημικά για να καθαρίζετε την συσκευή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το AcuTtrue, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την συσκευή. Αποθηκεύστε την σε θερμοκρασία δωματίου, κατά προτίμηση σε ένα στεγνό κουτί ή δοχείο.
- Κρατήστε το AcuTtrue μακριά από άλλες συσκευές μικρής συχνότητας καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Προβλήματα

Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην θέση ON. Αν εξακολουθεί να μην δουλεύει, βάλτε την συσκευή να φορτίσει.

Διπλή μόνωση

Η συσκευή αυτή είναι διπλά μονωμένη, συνεπώς, δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Πάντα να ελέγχετε ότι η τάση της συσκευής σχετίζεται με την τάση του ρεύματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250