

Κωδ: ΤΦΟΡΜ-1

GYM FORM DUO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΣ

Τέσσερα ειδικά σχεδιασμένα παντς για το Gym Form Duo, που μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν όμως και σε άλλες παρόμοιες συσκευές.

Οδηγίες Χρήσης

- 1 – Πλύνετε και σκουπίστε την περιοχή του δέρματος πριν τοποθετήσετε τα παντς.
- 2 – Συνδέστε και τα δύο παντς πάνω στο Gym Form Duo πριν τα τοποθετήσετε πάνω στο δέρμα.
- 3 – Αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο και τοποθετήστε τα πάνω στην επιθυμητή ομάδα μυών.
- 4 – Πριν να αφαιρέσετε τα παντς από το δέρμα πάντα να σβήνετε τη συσκευή.
- 5 – Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά αυτοκόλλητα πάνω στα παντς. Αυτή η διαδικασία θα επιμηκύνει την περίοδο ζωής τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΜΗΝ βάζετε τα παντς πάνω σε ερεθισμένο δέρμα. Αν εμφανιστεί κάποιο εξάνθημα, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η ζωή των τζελ παντς κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την προετοιμασία του δέρματος, τον τύπο διέγερσης και τις συνθήκες αποθήκευσης. Μετά από 30 συνεδρίες προτείνεται να αντικαθιστάτε τα παντς για μέγιστα αποτελέσματα. Ανταλλακτικά παντς είναι διαθέσιμα εκεί απ' όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αν δείτε ότι τα παντς δεν είναι αποτελεσματικά εντός του διαστήματος των 30 συνεδριών, μπορείτε να τα υγράνετε ελαφρώς με ένα βρεγμένο πανάκι.