

**ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΩΝΑ, ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ, ΓΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Χαρακτηριστικά:**

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: 57% Polyester, 21% Βαμβάκι, 12% Nylon, 10% Elastodiene

**Κωδ: ΜΑΓΑΓ-ΛΧΛ, ΜΑΓΑΓ-ΣΜ, ΜΑΓΑΣ-ΛΧΛ,  
ΜΑΓΑΣ-ΣΜ, ΜΑΓΓΟ-ΛΧΛ, ΜΑΓΓΟ-ΣΜ, ΜΑΓΚΑ-  
ΛΧΛ, ΜΑΓΚΑ-ΣΜ****Προειδοποίηση: Η κούρα με μαγνήτες είναι μια φυσική μέθοδος φροντίδας κατά του πόνου. Αν υποφέρετε από σωματικούς πόνους ή αν έχετε πάθει οποιοδήποτε τραυματισμό, αυτή η συσκευή δεν υποκαθιστά τη συμβουλή του γιατρού σας.**

- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ζώνη ή επίδεσμο, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.
- Αν νιώσετε πόνο ενώ φοράτε τον επίδεσμο ή αν αυξηθεί ο πόνος, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν άλλο και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από ανοιχτές πληγές.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχετε βηματοδότη.
- Δεν προτείνεται η χρήση των επιδέσμων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
- Ο επίδεσμος δεν είναι παιχνίδι: Κρατήστε τον μακριά από παιδιά.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο το προϊόν.
- Ο επίδεσμος λειτουργεί με μαγνητικά πεδία και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να τον αποθηκεύετε κοντύτερα από 20 εκατοστά από ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, τηλεοράσεις, βίντεο, βιντεοκασέτες ή κασέτες.
- Αποφύγετε την απευθείας επαφή με πιστωτικές κάρτες ή άλλες κάρτες που λειτουργούν με μαγνητικές λωρίδες. Αν αγνοήσετε αυτή τη συμβουλή, η κάρτα δεν θα λειτουργεί πλέον.

**Οδηγίες Χρήσης**

1. Οι μαγνήτες είναι ραμμένοι στο εσωτερικό του επιδέσμου. Θα πρέπει πάντα ο επίδεσμος να έρχεται σε απευθείας επαφή με το δέρμα.
2. Φορέστε τον επίδεσμο ενώ κάθεστε, για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
3. Τα μαγνητικά πεδία θα σας ωφελήσουν περισσότερο, αν μπορούν να δουλέψουν απευθείας πάνω στο δέρμα σας. Αλλά μπορείτε να φοράτε τον επίδεσμο πάνω από τα ρούχα σας, αν το επιθυμείτε.

**Ο επίδεσμος: Γενική περιγραφή:**

- Ο επίδεσμος διαθέτει 6 μαγνήτες στα 1000+ Gauss ο καθένας.
- Φοριέται αν νιώθετε πόνο στον αγκώνα, τον αστράγαλο, το γόνατο και τον καρπό ή αν έχετε τραυματιστεί σε σπορ. Ο επίδεσμος αποθηκεύει τη θερμοκρασία του σώματός σας και υποστηρίζει την περιοχή που έχει επιδεθεί.
- Κατάλληλος για το αριστερό ή το δεξί άκρο.
- Οι μαγνήτες είναι τοποθετημένοι εργονομικά.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777**